

Quelques conseils pour la prise en main du DA/DSA LIFEPAK CR-T Medtronic

- Choix de la langue :

page 26 (section française) du livret d'utilisation

- Appuyer sur le bouton « rouge » de la télécommande
- Appuyer sur le bouton « réglage du volume » de la télécommande
- Appuyer sur le bouton « flèche vers la droite » de la télécommande pour positionner la barre segment rouge face au repère n°3 de l'afficheur du DA/DSA
- Appuyer sur le bouton rouge de la télécommande pour valider la sélection

- Réglage mode automatique ou semi-automatique :

page 25 (section française) du livret d'utilisation

- Appuyer sur le bouton « vert » de la télécommande
- Appuyer sur le bouton « réglage du volume » de la télécommande
- Appuyer sur le bouton « flèche vers la droite » de la télécommande pour sélectionner et faire clignoter la barre segment n°1 de l'afficheur du DA/DSA
- Appuyer sur le bouton « flèche vers le haut » de la télécommande pour faire changer la couleur de la barre segment n°1 de l'afficheur du DA/DSA : **VERT = SEMI-AUTOMATIQUE**
ROUGE = AUTOMATIQUE
- Appuyer sur le bouton vert de la télécommande pour valider la sélection

- Choix et réglage du protocole de choc :

pages 20 et 24 (section française) du livret d'utilisation

- Appuyer sur le bouton « vert » de la télécommande
- Appuyer sur le bouton de la télécommande correspondant au protocole choisi (dans le cas d'un protocole fixe)

Exemple : **Touche F2** de la télécommande = protocole n°2

(Protocole n°2 = deux décisions *choc conseillé* suivi de deux décisions *choc non conseillé*)

- Appuyer sur le bouton vert de la télécommande pour valider la sélection

Pour un protocole personnalisé, suivre les instructions de la page 24 (section française) du livret d'utilisation

Au démarrage du DA/DSA, pour connaître le protocole en cours

d'utilisation, appuyer 2 fois sur le bouton vert de la télécommande afin de visualiser sur l'afficheur la composition du code du protocole (couleur et organisation des barres) précisée à la page 24 (section française) du livret d'utilisation.

- Réglage des temps de RCP :

page 26 (section française) du livret d'utilisation

- ✖ RCP 1 = RCP après *choc conseillé*

- ✖ RCP 2 = RCP après *choc non*

conseillé

- Appuyer sur le bouton "rouge" puis sur le bouton « T1 » de la télécommande (pour régler le temps de RCP 1)

- Appuyer sur le bouton « flèche vers la droite » de la télécommande pour sélectionner la barre segment de l'afficheur du DA/DSA correspondant au temps souhaité :

Exemple : Barre n°3 = 45 secondes / Barre n°4 = 60 secondes ...

- Appuyer sur le bouton rouge de la télécommande pour valider la sélection

- Appuyer sur le bouton « T2 » de la télécommande (pour régler le temps de RCP 2)

- Appuyer sur le bouton « flèche vers la droite » de la télécommande pour sélectionner la barre segment de l'afficheur du DA/DSA correspondant au temps souhaité :

Exemple : Barre n°3 = 45 secondes / Barre n°4 = 60 secondes ...

- Appuyer sur le bouton rouge de la télécommande pour valider la sélection

- Procédure de réinitialisation :

page 27 (section française) du livret d'utilisation

- Arrêter l'appareil avec l'interrupteur principal

- Mettre en marche l'appareil avec l'interrupteur principal en tenant celui-ci appuyé pendant 5 secondes

- Quatre barres jaunes doivent apparaître sur l'afficheur du DA/DSA : dans ce cas, l'appareil est réinitialisé.