

Vérifier le manomètre avant toute utilisation (voir paragraphe « TEST »)

Utilisation avec le masque laryngé Ambu® Aura:

Les tests de bons fonctionnements décrits dans la présente notice doivent être effectués avant toute utilisation avec le masque laryngé Ambu Aura.

Insérer le masque laryngé Ambu Aura conformément aux instructions mentionnées dans le mode d'emploi du masque. Connecter la tubulure du manomètre au tube de raccordement du ballonnet. Sans tenir le tube, gonfler le ballonnet avec suffisamment d'air pour obtenir l'étanchéité, soit l'équivalent d'une pression interne du bourrelet d'environ 60 cm H₂O. La pression peut être contrôlée en permanence grâce à la connexion du manomètre au ballonnet. En cas d'augmentation de la pression, appuyer sur le bouton rouge pour ajuster à la pression souhaitée. La pression ne doit pas dépasser 60 cm H₂O.

Utilisation avec des sondes endotrachéales à ballonnets à basse pression et grand volume:

Avant intubation ou extubation, dégonfler entièrement le ballonnet avec une seringue et vérifier que la ligne d'inflation est fermée. Connecter la tubulure du manomètre au tube de raccordement du ballonnet de la sonde endotrachéale. Gonfler le ballonnet à une pression de 60 à 90 cmH₂O pour lui permettre de se plaquer parfaitement contre les parois de la trachée. Dégonfler immédiatement le ballonnet en appuyant sur le bouton rouge jusqu'à ce que l'aiguille atteigne la plage verte intitulée « Tracheal Tube » sur le cadran. Nous recommandons une pression interne du ballonnet supérieure à 22 cm H₂O en raison des risques d'aspiration ou de pneumonie et inférieure à 32 cm H₂O en raison des risques d'ischémie de la muqueuse trachéale. (Voir traité médical de J. Stauffer dans Respiratory Care, Juillet 1999). Grâce à la connexion permanente du manomètre à la sonde endotrachéale, la pression dans le ballonnet peut être vérifiée à tout moment ; en cas d'augmentation de la pression, appuyer sur le bouton rouge pour ajuster à la pression souhaitée.

Consignes de nettoyage

Si nécessaire, on peut nettoyer le dispositif avec un tissu doux et non pelucheux et un détergent doux. Le dispositif ne doit en aucun cas être immergé ! Pour désinfecter l'appareil, utiliser un linge et un désinfectant de surface à base d'alcool.

Ne pas utiliser de méthode mécanique pour le lavage et la stérilisation.

Attention: Ne pas utiliser d'agents agressifs pour le nettoyage du verre du cadran (matières plastiques)!



Latex free

Sans latex. Mentionné lorsque les produit ne contiennent pas de latex.

TEST

- Boucher le connecteur avec le doigt
- Gonfler avec la poire à 120 cm H₂O ; l'aiguille doit y rester environ 2-3 secondes, si l'aiguille baisse, le manomètre doit être expédié au fabricant pour réparation.

