


Guide Rapide Ambu® Logiciel RCP Wireless

Installation de la mise à jour du logiciel version V1.1.1

Les mannequins AmbuMan sont dans un processus d'amélioration continue. Les mannequins AmbuMan sont mis à jour en permanence avec des mises à jour régulières. Ce guide vous expliquera comment mettre à jour le logiciel.


Remarque : Il est recommandé d'enregistrer la base de données du mannequin avant de démarrer l'installation de la mise à jour logicielle. (Voir page 2 de ce guide rapide)

1. Ouvrez la page Configuration

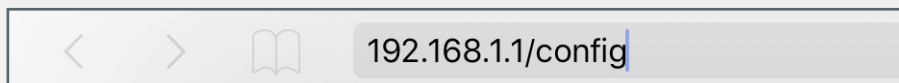


Allumez le mannequin et connectez-le en sélectionnant le réseau wifi "AmbuW".

Ouvrez votre navigateur et entrez 192.168.1.1/config dans la barre de recherche du navigateur, afin d'accéder au menu "Configuration".

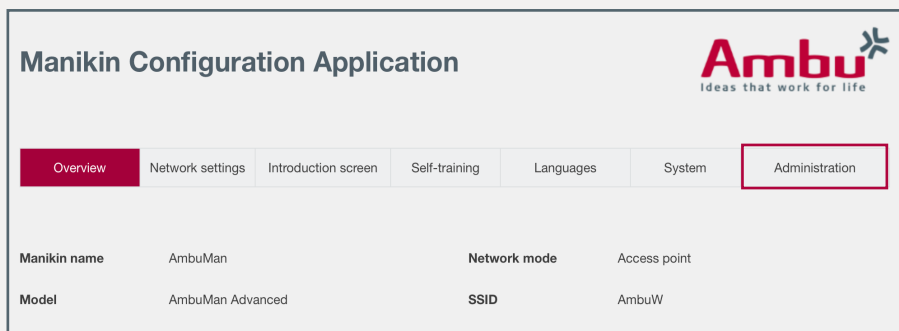


Cliquez sur l'onglet "Administration" dans le menu Configuration.

2. Etape 1 : Mettre à jour le logiciel à V 1.1.1

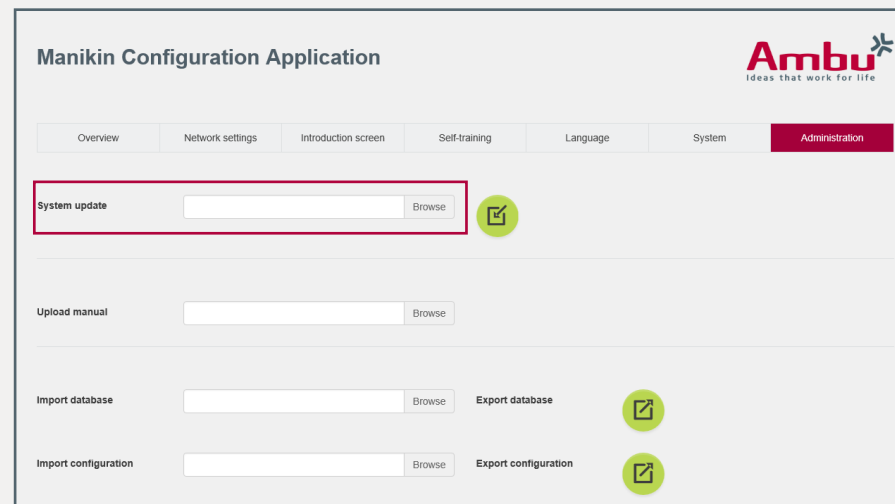

Pour importer une nouvelle mise à jour du logiciel, ouvrez le fichier en cliquant sur "Parcourir" dans la partie "Mise à jour du système", il est possible de rechercher le fichier désiré.

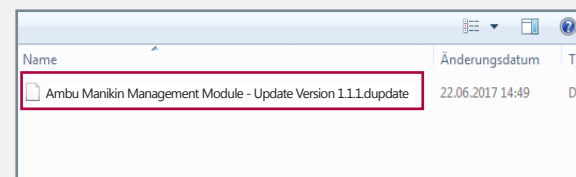



Accédez à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier, sélectionnez le et ouvrez-le (dans ce cas: **Ambu Manikin Management Module-Update Version 1.1.1.dupdate**).

Note: Enregistrez le fichier de mise à jour dans un emplacement facilement accessible



Suite : Mettre à jour le logiciel

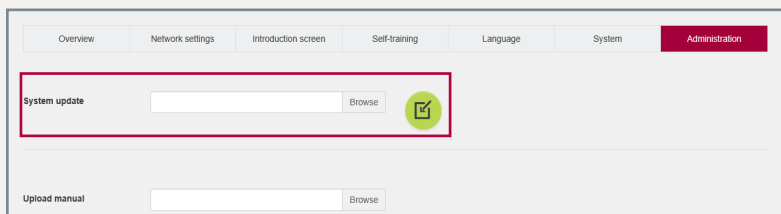


Le fichier est automatiquement transféré dans le champ approprié. Pour terminer la mise à jour, cliquez sur le bouton  "importer" et le message suivant apparaît :

Upload succeeded. The system will shut down to update the manikin software.

Le mannequin s'arrête automatiquement et redémarre pour effectuer toutes les mises à jour. Attendez que le bouton de démarrage du mannequin soit fixe pour vous reconnecter au mannequin.

3. Etape 2 : Mettre à jour le système d'exploitation

Vous devez également importer un deuxième fichier de mise à jour dans le mannequin. Veuillez donc répéter les étapes 1 et 2, puis sélectionnez cette fois le fichier de mise à jour du système d'exploitation : **xxLinuxxx.dupdate**

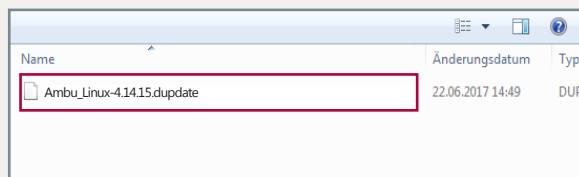


Note: Veuillez bien respecter l'ordre des mises à jour. Vous devez d'abord installer la mise à jour du logiciel, ensuite la mise à jour du système d'exploitation.

4. Cliquez sur l'onglet "Présentation" dans la page configuration

Overview	Network settings	Introduction screen	Self-training	Languages	System	Administration
Manikin name	AmbuMan	Network mode	Access point			
Model	AmbuMan Advanced	SSID	AmbuW			
Manikin mode	Host	Channel	1			
Software version	1.1.1	DHCP/DNS	Server			
OS version	Jun 29 2018	Netmask	255.255.255.0			
IP address	192.168.1.1	Encryption	None			
MAC address	44:85:00:87:2D:55					

Vous pouvez vérifier la version du logiciel dans la page configuration. Entrez **192.168.1.1/config** dans le champ d'adresse du navigateur. Dans l'onglet "Présentation", partie "Version du logiciel" :
-> La version est indiquée **1.1.1** et la version OS **Jun 29 2018**.

NOTE

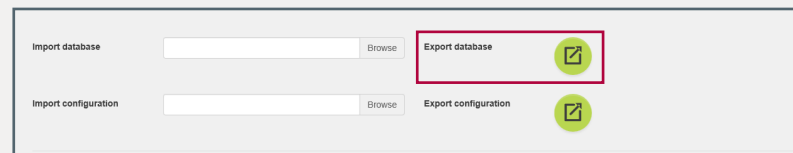

Avant de démarrer l'installation de la mise à jour logicielle V1.1.1, il est recommandé d'enregistrer la base de données.

Cliquez sur l'onglet "Administration" dans le page Configuration. Cliquez sur le bouton vert "Base de de données à l'exportation" pour exporter la base. 